

Citas de seguimiento

Al recibir su PAM, se programará una cita de servicio para usted.

Esta cita suele tener lugar entre 30 y 60 días después de recibirla. Seguirá teniendo citas cada 30 a 60 días hasta que finalice su programa.

Reprogramación de citas

Debe llamar con 24 horas de anticipación para cambiar una cita de monitoreo programada. De no hacerlo, se le cobrará un cargo por la cita perdida.

Devolución del dispositivo

Después de completar el programa, es su responsabilidad devolver el dispositivo al centro de servicio para evitar cargos por uso o tarifas del dispositivo adicionales.

ADVERTENCIA: Si no asiste a una cita de monitoreo o no responde a un llamado anticipado, se enviará un informe de incumplimiento a su autoridad de monitoreo.

Cargando la unidad

Para garantizar que su dispositivo permanezca cargado, utilice el cargador tipo C proporcionado. Se requiere un mínimo de cuatro horas de carga diaria. Si la batería del dispositivo se descarga al 0 %, estará incumpliendo la normativa y se denunciará ante el tribunal.

¿Necesitar ayuda?

Te tenemos cubierto.

¡MyAccount es su ventanilla única para todo lo relacionado con LifeSafer!

En MiCuenta, puede obtener respuestas a preguntas frecuentes, administrar sus citas, acceder a información de facturación y ¡mucho más!

Para iniciar sesión, visite: MyAccount.LifeSafer.com o escanee el código QR a continuación.



¿Necesita hablar con un agente de LifeSafer? ¡Llame a nuestro equipo o chatee con nosotros en línea!



(855) 481-8511



LifeSafer.com/contact-us



LifeSafer
Portable Alcohol Monitoring

Guía del usuario

¿Cómo funciona la unidad portátil de monitoreo de alcohol (PAM)?

LifeSafer PAM es un alcoholímetro portátil con cámara integrada. El dispositivo mide con precisión el BrAC del usuario y es totalmente portátil, ya que no necesita enchufarse para funcionar.

- Interfaz fácil de usar: PAM incluye una pantalla de visualización y un teclado para una navegación fluida.
- Soporte multilingüe: PAM ofrece múltiples opciones de idioma, que se pueden cambiar fácilmente utilizando el botón de flecha derecha.

La autoridad de control establecerá un cronograma de los tiempos de prueba y lo proporcionará junto con este manual.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Información sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. De acuerdo con la Sección 15.21 de las Normas de la FCC, cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

¿Cómo uso PAM?

Encender el dispositivo

Cuando el dispositivo está frente a usted, el botón de activación se encuentra en el lado izquierdo.

Pruebas

Según el cronograma establecido por su autoridad de monitoreo, es posible que deba realizar autopruebas durante períodos de tiempo designados, o el dispositivo se activará y emitirá un pitido para notificarle cuando sea el momento de realizar una prueba.

Cómo realizar un examen

Cuando la pantalla muestre "SOPLAR", el dispositivo estará listo para realizar una prueba de aliento. Sople en el dispositivo durante unos cinco segundos hasta que oiga un pitido.

A continuación la pantalla mostrará "ESPERE".



Autoprueba


Para realizar una autoprueba, presione el botón de activación y use la flecha derecha para navegar por las opciones de la pantalla hasta llegar a Prueba de Alcohol.

Una vez que aparezca, presione la flecha hacia abajo para iniciar la prueba. El PAM se calentará y mostrará "SOPLAR" para indicar que está listo para que complete la prueba.

Resultados de la prueba

Aprobar

Si la pantalla muestra "PASÓ", ha aprobado el examen y se mostrará la hora de su próximo examen. Esta puede ser una hora exacta o un intervalo de tiempo.

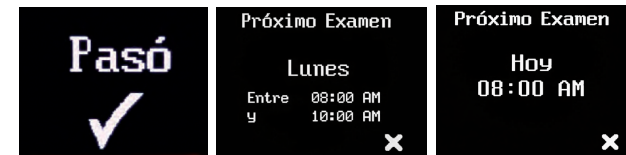

Fallo

Si la pantalla muestra "FALLO", significa que no pasó la prueba.

Es posible que necesites volver a realizar la prueba. La pantalla mostrará "ESPERA" mientras el dispositivo se reinicia para que puedas volver a realizarla. La pantalla mostrará la cuenta regresiva de los segundos que debes esperar.



Nueva prueba

Cuando llegue el momento de repetir la prueba, la pantalla mostrará "ESPERE". Según los resultados, indicará "FALLO" o "Aprobar". A continuación, la pantalla mostrará la hora de la siguiente prueba.